

KIT DE DÉPISTAGE

Infections Sexuellement Transmissibles (gonorrhée/chlamydia)

LES ÉLÉMENTS DU KIT DE PRÉLÈVEMENT

Selon la demande, vous n'aurez pas besoin d'utiliser tous les éléments du kit.



Écouvillon



Tube de
prélèvement



Pipette de
transfert urines



Sachet
de transport



Pot de prélève-
ment urines



Réalisation du prélèvement

A FROTTIS

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- écouvillon
- tube de prélèvement
- sachet

- 1 Ouvrir le sachet contenant l'écouvillon (le frottis) **sans toucher la partie ouatée**, qui est la partie à insérer.
- 2a **Frottis gorge** : frotter le fond de votre gorge avec l'écouvillon, après la lchette, de part et d'autre
- 2b **Frottis anal** : insérer l'écouvillon de 3 à 5 cm en le faisant tourner délicatement
- 2c **Frottis vaginal** : insérer l'écouvillon d'environ 5 cm et le faire pivoter délicatement contre les parois pendant une vingtaine de secondes (*si possible, faire le frottis en dehors des règles*)
- 3 Après prélèvement, ouvrir le tube de prélèvement contenant du **liquide (ne pas le vider !)** et mettre l'écouvillon dedans, puis **casser la tige au niveau du repère**. Jeter la partie supérieure (cassée) de la tige.

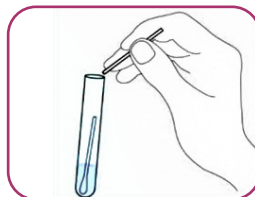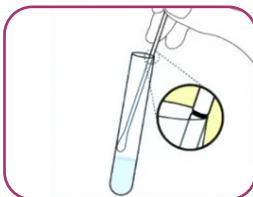

Réalisation du prélèvement



B URINE "PREMIER-JET"

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- pot à urine
- tube de prélèvement
- pipette de transfert
- sachet

Idéalement première urine du matin ou ne pas avoir uriné au moins une heure avant le prélèvement.

- 1 **Uriner** dans le pot à urine (environ 40 ml)
- 2 **Prélever** les urines avec la **pipette et transférer** dans le tube jusqu'au niveau de la fenêtre

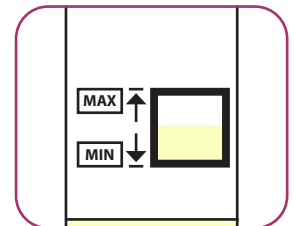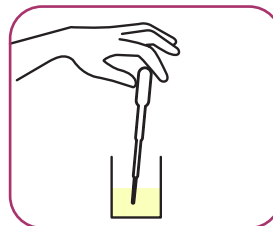

- 3 **Ajouter au liquide** déjà présent dans le tube (à ne pas vider !) et à l'éventuel frottis
- 4 **Refermer bien** le tube de prélèvement puis le **mettre dans le sachet plastique**

Si aucun autre test sur les urines n'est demandé, vider votre pot à urines dans les toilettes puis le jeter avec la pipette dans la poubelle.

Réalisation du prélèvement C POOL FROTTIS + URINE

Faire le **frottis** (voir A) puis ajouter les **urines** "premier-jet" (voir B) dans le **même tube de prélèvement**.

SCREENINGKIT

Seksueel Overdraagbare Aandoeningen

(gonorroe/chlamydia)

ONDERDELEN VAN DE AFNAMEKIT

Afhankelijk van de aanvraag hoeft u mogelijk niet alle onderdelen van de kit te gebruiken.



Wisser



Afnamebuisje



Transferpipet



Zakje



Urinepotje



Staalafname

A UITSTRIJKJE

MATERIAAL

- wisser
- afnamebuisje
- zakje

- 1 Open het zakje met de wisser **zonder het gewatteerde deel** (het deel dat u moet inbrengen) aan te raken.
- 2a **Keeluitstrijkje:** wrijf met de wisser over de achterkant van de keel, voorbij de huid, aan beide kanten
- 2b **Anaal uitstrijkje:** breng de wisser 3 tot 5 cm in en draai voorzichtig rond
- 2c **Vaginaal uitstrijkje:** breng de wisser ongeveer 5 cm in en draai voorzichtig rond tegen de wanden van de vagina, gedurende ongeveer 20 seconden (*neem het uitstrijkje indien mogelijk buiten de menstruatieperiode*)
- 3 Open na de staalname het afnamebuisje met **vloeistof** erin (**niet leeggieten!**), plaats de wisser erin en **breek** vervolgens **het steeltje af ter hoogte van de marking**. Gooi het bovenste (afgebroken) deel van het steeltje weg.

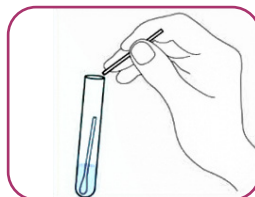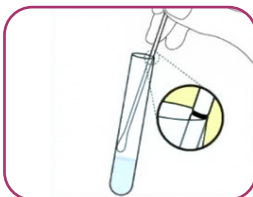

Staalafname



B URINE 'EERSTE STRAAL'

MATERIAAL

- urinepotje
- afnamebuisje
- transferpipet
- zakje

In het ideale geval gebruikt u de eerste ochtendurine of hebt u ten minste een uur voor de afname niet geürineerd.

- 1 **Urineer** in het urinepotje (ong. 40 ml)
- 2 **Neem een staal** van de urine met **de pipet en breng het over** naar het buisje tot op het niveau van het venstertje

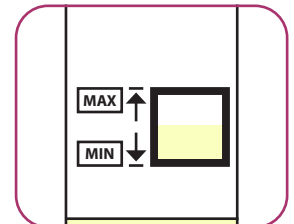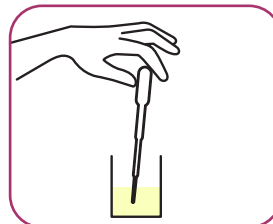

- 3 **Voeg het toe aan de vloeistof** die al in het buisje zit (niet leegmaken!) en aan het eventuele uitstrijkje
- 4 **Sluit** het afnamebuisje **weer goed af** en **stop het in het plastic zakje**

Als er geen verder urineonderzoek wordt aangevraagd, leegt u uw urinepotje in het toilet en gooit u het samen met de pipet in de afvalbak.

Staalafname C POOL-UITSTRIJKJE + URINESTAAL

Neem het **uitstrijkje** (zie A) en voeg vervolgens de **urine** 'eerste straal' (zie B) toe aan **hetzelfde afnamebuisje**.